

Alma PrimeX | Pièces à main



UltraWave

La pièce à main révolutionnaire UltraWave utilise les ultrasons transversaux. Grâce à sa plaque extra-large, elle modèle le corps plus rapidement, chauffant ainsi les tissus et ciblant plus efficacement les cellules graisseuses difficiles à éliminer.

Elle combine **4 technologies inédites** : ConeX, Impulse, MaXimize, ReACCT

UniBody

La pièce à main **UniBody** combine la technologie unipolaire d'Alma avec un applicateur rotatif afin d'effectuer un drainage et de remodeler le corps. Notre radiofréquence la plus puissante du marché avec 40,68 % MHz, permet de chauffer la peau à **4 profondeurs distinctes de l'épiderme**, garantissant ainsi une meilleure production de collagène.

L'inversion de polarité des molécules d'eau génère un important chauffage diélectrique qui cible le collagène pour stimuler au mieux sa production.

Xcentuate

Le système Xcentuate utilise la **radiofréquence** par l'intermédiaire de 2 applicateurs, dont la température est réglable, pour remodeler le corps et raffermir la peau sur de grandes zones.



NOUVEAUTÉ - Alma Air

Pour assurer un **confort maximal**, nous avons mis au point **Alma Air**, une ceinture ajustable conçue pour transporter les applicateurs Alma pendant que vous travaillez. Conscient de la nature de votre pratique et de la nécessité d'avoir un maximum d'aisance, Alma Air a été développé par nos équipes pour vous soulager et vous **permettre de travailler facilement** et sans effort.

Pratique et confortable, il est composé d'une **matière respirante** pour éviter la transpiration.



Alma
For You. For Life.



Alma **PrimeX**

REFINING EVERY BODY

Alma
For You. For Life.

www.almafrance.fr - info@almafrance.fr



X Factor di PrimeX

PrimeX, leader en matière de raffermissement du corps, regroupe une combinaison exclusive d'ultrasons et de radiofréquences brevetées disposant de 4 technologies révolutionnaires qui, ensemble, donnent des résultats spectaculaires à chaque traitement.

ConeX

L'applicateur dispose d'une forme conique unique afin d'amplifier les ondes acoustiques et de minimiser la réflexion des ondes ultrasonores. Il va également permettre de répartir correctement l'énergie, sans la laisser au centre.

Impulse

Les ultrasons sont délivrés par impulsions, plutôt que de manière continue, grâce à un effet mécanique qui crée de petites ondes de choc, rendant le traitement plus efficace.



MaXimize

Une fonction de ventouse permettant de maintenir le contact entre l'applicateur et la peau assure une diffusion maximale et uniforme des ultrasons sur la zone de traitement et maximise les résultats.

ReACCT

Le système reconnaît les caractéristiques du tissu et va ainsi contrôler la puissance énergétique à délivrer tout au long de la séance pour s'adapter aux caractéristiques physiques du patient.

Protocoles uniques de traitement pour chaque corps

Alma PrimeX offre 3 options de traitement, de manière à répondre aux attentes de chaque patient.

PrimeX Pro (UltraWave + Xcentuate)

Combinant les pièces à main **UltraWave** et Xcentuate, le traitement **PrimeX Pro** est idéal pour remodeler et raffermir la peau. Les ondes ultrasoniques de l'UltraWave vont venir attaquer les graisses, tandis que la radiofréquence de l'Xcentuate **raffermit la peau et la rend plus ferme**. La pièce à main Xcentuate permet un traitement automatisé.

Durée du traitement	Nombre de séances	Intervalle entre les séances
30 minutes UltraWave 20 minutes Xcentuate	3	1-2 semaines

PrimeX Classic (UltraWave)

D'excellents résultats en 20 minutes seulement

PrimeX Classic est idéal pour un remodelage efficace du corps. Les ultrasons non invasifs ciblent les graisses sous la surface de la peau pour permettre d'obtenir une **silhouette plus fine**, mieux dessinée et sans douleur.

Durée du traitement	Nombre de séances	Intervalle entre les séances
20 minutes	4	1 semaine



Avant



Après 1 semaine



Après 1 mois



Après 3 mois

PrimeX Premium (UltraWave + UniBody)

Pour un incroyable remodelage et raffermissement de la peau

PrimeX Premium pénètre à l'intérieur des couches de la peau, ce qui permet de réduire la cellulite et raffermir la peau de manière plus intensive.


La pièce à main UltraWave **cible la graisse localisée afin de l'éliminer**.

Ceci est suivi d'un raffermissement à l'aide de la radiofréquence produite par UniBody qui, grâce au rouleau de massage rotatif intégré, assure une circulation accrue, une diminution de la cellulite et l'amélioration de la texture de la peau.

Durée du traitement	Nombre de séances	Intervalle entre les séances
20 minutes	4	1 semaine



Avant

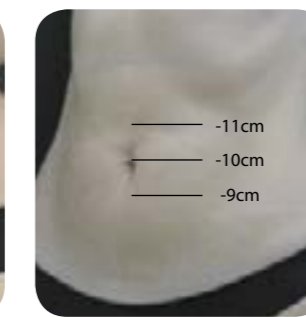

Après 1 semaine



Avant



Après 1 mois



Nos technologies vous intéressent ?
Remplissez notre formulaire de contact
et nous vous contacterons
pour organiser une
DÉMO GRATUITE
dans votre centre !

NOUS CONTACTER