Applicateur	Longueur d'onde (nm)	Spot	Adapté pour :
Acne 420	420-950	6.4 cm ²	Acné active
UVB	270-380	6.4 cm ²	Psoriasis et vitiligo
SHR PRO	650 - 950	6.4 / 5 cm ²	Epilation
SR 570	570 - 950	3 cm ²	Lésions pigmentaires
Alma Zero	Crio (-10° / +45°)	5 cm ²	Acné active
Dye-VL	500-600	3 cm ²	Lésions vasculaires
Dye-VL PRO	450-600	1 cm ²	Lésions vasculaires et ony- chomycose
Dye-SR	550-650	3 cm ²	Lésions pigmentaires
NIR	1320	6.4 cm ² 18 cm ²	Relâchement du visage Raffermissement du corps
Nd: YAG Long Pulse	1064	2 mm 6mm	Lésions vasculaires du visage et des membres inférieurs
ClearLift Q-Switched	ND: YAG 1064 KTP 532	3 & 5 mm CVD: 1-5 mm 5X5 Pixel 4 mm	Suppression des tatouages Rajeunissement du visage et du cou Taches cutanées
Erbium: YAG iPixel	2940	1 mm 4 mm 7X7 Pixel 9X9 Pixel 1X7 Pixel	Resurfaçage ablatif Rides Rajeunissement du visage Cicatrices Vergetures
ClearSkin Erbium Glass	1540	4 mm 10 mm 7X7 Pixel	Acné active Cicatrices d'acné Rajeunissement non ablatif



Focus. Flexibility. Freedom. That's Harmony.





www.almafrance.fr - info@almafrance.fr











Un éventail de solutions à votre disposition!

Grâce aux différentes pièces à main, Harmony propose des protocoles de pointe pour garantir des résultats efficaces et durables dans le temps.

- Appareil multitechnologique comprenant 14 technologies distinctes;
- Plus de 60 indications médico-esthétiques approuvées par la FDA;
- Extensible et évolutif à tout moment.
- Lésions pigmentaires
 Lésions vasculaires
- **▶** Acné et cicatrices **▶** Texture et éclat du teint
- **▶** Rajeunissement du visage **▶** Épilation **▶** Détatouage
- Resurfacing du visage

La combinaison gagnante

Acné et cicatrices

La double puissance du laser ClearSkin (Er:Glass 1540), jusqu'à 300 mJ, garantit des résultats sûrs et efficaces pour le traitement de l'acné et des cicatrices.



Grâce à l'action combinée avec la pièce à main Alma-0, il est possible d'obstruer la glande sébacée, caractéristique de l'acné, et d'éliminer l'excès de sébum.

Le laser ClearSkin en mode aspiration va venir nettoyer et éliminer le sébum des peaux grasses.

En mode fractionné (Pixel 7x7), sans aucune ablation et en laissant les tissus intacts, le ClearSkin rajeunit les tissus et élimine les cicatrices d'acné en stimulant la production du nouveau collagène.

Taches et imperfection

Deux technologies combinées afin de traiter les lésions pigmentaires et les imperfections de la peau tout en rajeunissent également les tissus.



Grâce à la puissance de la lumière AFT Dye-

SR (550-650) qui lit la mélanine, il est possible d'éliminer les imperfections et d'unifier la couleur de la peau.

La technologie ClearLift (Q-Switched 1064) avec KTP est utilisée pour éliminer les taches et l'utilisation du mode fractionné (Pixel 5x5) permet d'obtenir un rajeunissement des tissus tout en stimulant la production de collagène.

Texture et éclat du teint

Pour donner du tonus et rajeunir les tissus, Alma propose la combinaison de Technologie NIR (infrarouge 1320) et Erbium : YAG 2940.



Le NIR, grâce au dégagement de chaleur procure un effet "tenseur" sur les tissus, réduisant les signes de vieillissement.

Le laser Erbium : YAG 2940, grâce à son importante absorption d'eau, est capable de créer un resurfacing complet : la couche superficielle est éliminée grâce à l'action ablative et la technologie fractionnée permet de dégager une importante source de chaleur en profondeur, rajeunissant ainsi les tissus.

En plus du protocole visage, la combinaison du NIR et de l'Erbium : YAG 2940 est très précieuse pour tonifier et raffermir le corps en éliminant les imperfections telles que les cicatrices et les vergetures.

Lésions vasculaires visage et corps

En combinant la lumière AFT-VL (500-600) et le laser Nd : Lp YAG 1064, il permet de traiter tous les types de lésions vasculaires.



L'applicateur offre une vision grand angle unique avec un faisceau qui améliore

considérablement la visualisation des vaisseaux sanguins sous la peau.

Le laser Nd: Lp YAG, grâce à son double spot, traite tous les types de lésions, même les plus importantes, que ce soit sur le visage ou ceux des membres inférieurs.

Nos technologies vous intéressent?
Remplissez notre formulaire de contact et nous vous contacterons pour organiser une

DÉMO GRATUITE dans votre centre!

NOUS CONTACTER